

## KULLANMA TALİMATI

Katalog No: A00226

Bileşenleri: Metakrilat türevi bileşikler ve yardımcı malzemeler.

Paketleme 1,5 gr. şırınga

## PROBAR LC – IŞIKLA SERTLEŞEN DİŞ ETİ BARIYERİ

### 1- Açıklama

Işıkla sertleşen diş eti koruyucu bariyeridir.

### 2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

PROBAR LC, ışık yansıtıcı, pasif adeziv (mühürleyen), ışıkla sertleşen rezindir. Metakrilat bazlı PROBAR LC uygulandıktan sonra kolaylıkla çıkarılır. Beyazlatma öncesinde veya diş etinin korunması gereken alanlarda kullanılabilir

### 3- Kullanım şekli

Şırınga kapağı çıkarın ve Probar LC şırıngasına tek kullanımlık bir ucu sıkıca takın. Kendinden destekli plastik yanak retraktörleri yerleştirin. Dişleri tümüyle yıkayıp kurutun ve gingival üçte birlik kısma özellikle dikkat edin. Rezin bariyeri uygulandıktan sonra rezini tarayıcı bir hareket kullanarak kaliteli bir sertleştirme ışığıyla 20 saniye sertleştirin.

### Temizleme İşlemi:

Beyazlatıcı jeli tümüyle emdikten sonra dişleri hava/su şırıngası ile yıkayıp emme işlemi gerçekleştirin. PROBAR LC bariyeri, yüzeyden bir explore veya başka bir alet kullanarak kaldırın. PROBAR LC interproksimal olarak explore ve/veya diş ipliği kullanarak çıkarın. interproksimal olarak kuvvetli hava/su spreyi ile yıkayın.

### 4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

### 5- Yan etkiler

Bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

### 6- Uyarı:

Tedaviye başlamadan önce talimat ve önlemlere dikkat edin. Çocuklardan uzak tutun. PROBAR LC ‘yi rezinlere ve özellikle metakrilatlara alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanmayın. Dermatit, döküntü veya başka herhangi bir alerjik reaksiyon gelişirse bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve hastayı bir doktora gönderin. Materyal enjekte edilmemelidir. Ürünleri sıcaktan ve güneş ışığından koruyun. İntraoral kullanımdan önce akışın homojenliğinden emin olmak üzere materyalin akışını inert bir yüzeyde kontrol edin. Direnç hissedilirse devam ETMEYİN. Hastada kullanmadan önce yeni bir uç takıp tekrar deneyin. Bu ürünü kullanmadan önce gingiva ve ağız sağlığı kontrol edilmelidir. PROBAR LC kenarı boyunca tekrar kabarcıklar oluşursa jeli yıkayın ve sızıntı kontrolü yapın.

Bölgeyi hafifçe kurutun ve tekrar PROBAR LC uygulayın. Problem devam ederse örtü kısmını çıkarın ve tekrar uygulayın. Yutulmamasına dikkat edilmelidir.

### 7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

### NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**\*\* Bertaraf:** Ürünler biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMİDA DİŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

[info@promida.com.tr](mailto:info@promida.com.tr) [www.promida.com.tr](http://www.promida.com.tr)