

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: RC0260 ve RC0261

Bileşenleri:

Kalsiyum hidroksit, Baryum sülfat, Sodyum karboksimetil selüloz, Polietilen Glikol, saf su

Paketleme: 2 gr. Şırınga x 1 adet + uçlar

2 gr şırınga x 2 adet + uçlar

PROCAL R RADYOOPAK KALSİYUM HİDROKSİT PATİ

1- Açıklama

ProCal R kullanıma hazır, visköz, enjekte edilebilir, kalsiyum hidroksit esaslı bir paktır. Yüksek bazik pH'a (>12)sahiptir. Radyoopaktır. Kullanıma hazır formu sayesinde uygulama kolaylığı sağlar.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Geçici kök kanal dolgusu olarak,

3- Kullanım şekli

Kaviteyi her zaman olduğu gibi hazırlayınız. Çalışma alanı iyi bir şekilde kurutulmalıdır. Lastik örtü (Rubber-dam) yerleştirilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanların hekim için (gözlük, maske, eldiven) ve hasta için (gözlük) kullanılması önerilir. ProCal R Kök kanalına uygulanması, Kemomekanik hazırlık tamamlandıktan sonra kağıt konlar ile kurutulmasını takiben ProCal R kök kanalına yerleştirilir.

Kök kanalında tedavi protokolüne uygun olarak 7-30 gün süre ile bekletilmesi önerilir. Tedavi sonrası kanaldan uzaklaştırılır.

Lentülo spiral veya rotasyonel hareket eden özel pat taşıyıcı sistemler kullanılacak ise; Çalışma boyundan 1mm kısa olacak şekilde düşük devir (<800rpm) ve minimum tork ile kullanılması tavsiye edilir.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

5- Yan etkiler

Kanal sistemine ProCal R çok hızlı/ yüksek basınçlı iletimi periapikal dokulara taşırılmasına neden olabilir. Bu durum hastada akut ve kronik doku hasarına, şiddeti değişen ağrıya, hematoma, parestezi, kanama, disfaji, yaygın şişlik, trismus gibi komplikasyonlara neden olabilir.

6- Uyarı:

Pat halindeki kalsiyum hidroksit yüksek PH'ya sahiptir. Kullanım sırasında rubberdam ile hastanın mukozasını koruyunuz. Cilt veya göz ile temasında bol su ile yıkayınız. Yalnızca profesyonel diş hekimleri tarafından uygulanabilir.

Şırınganın ağzını kullandıktan sonra kapalı olarak saklayınız. İçeriğinden herhangi birine karşı bilinen bir alerji durumu varsa kullanmayınız.

Geçici dolgu esnasında aşırı doldurma işlemi hastada disestezi,

parastezi, ağrı ve uyuşma hissine sebep olabilir

**Ürünü kullanırken lateks eldiven ile kullanınız, temastan kaçınınız.
Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.**

7- Saklama koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

8- Semboller ve Anlamları:

 **PROMIDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr

Döküman No: TF.01.122 Yayın Tarihi: 01.11.2022 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi: 15/02/2024

	Lot Numarası		İmalat Tarihi
	Katalog Numarası		İmalatçı
	Süresinde kullanınız		Güneş ışığından uzak tutunuz
	Uyarı, Beraberinde Verilen Dökümanlara Başvurunuz		Kullanma Talimatlarına Başvurunuz.
	Kuru yerde saklayınız.		Onaylanmış Kuruluş